

	SISTEMA GESTIONE ASSC	PC 43 ALL 08
	SANIFICAZIONE E STERILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI	Data 13/02/2026

PROCEDIMENTO PER LA SANIFICAZIONE E STERILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI

TRATTAMENTO DEI TERMOMETRI CLINICI: (pratica consigliata a fine di ogni turno)

- 1) Lavare i termometri ed i loro contenitori con acqua e detergente.
- 2) Risciacquarli, asciugarli e immergerli in una soluzione acquosa di disinfettante per 30 minuti.
- 3) Asciugarli e conservarli asciutti nei loro contenitori.
- 4) Nell'attività diretta dopo l'uso con un utente/ospite pulire il termometro con disinfettante e cotone/garza puliti.

TRATTAMENTO DI PADELLE E PAPPAGALLI NUCLEI RSA:

- 1) Il trattamento viene eseguito in modo automatico nella macchina lavapadelle con il ciclo di disinfezione a caldo (accertare con controlli periodici che la macchina effettui correttamente il ciclo di disinfezione).
- 2) Una volta lavati vanno conservati asciutti negli appositi ripiani, spazi, contenitori presenti nei nuclei.

TRATTAMENTO DI PADELLE E PAPPAGALLI CDI e SERVIZI DOMICILIARI:

- 1) Il trattamento viene eseguito manualmente con detergente e scovolino.
- 2) Dopo il trattamento risciacquare e asciugare con panno monouso.
- 3) Immergere quindi in soluzione disinfettante per circa 1 ora.
- 4) Una volta lavati vanno conservati asciutti negli appositi ripiani, spazi, contenitori.

NB: il maggior pericolo di trasmissione di infezioni si presenta nel momento del contatto tra le mani dell'operatore e la padella; è d'obbligo quindi l'uso dei DPI e un accurato lavaggio delle mani prima e dopo il trattamento.

STERILIZZAZIONE STRUMENTI:

Sia per i servizi RSA e CDI che per i Servizi Domiciliari viene utilizzato tutto materiale sterile monouso (arcelle, kit cateterismo, kit medicazione, kit sutura, kit rimozione sutura, pinze levapunti metallici, ecc.).

