

	<b>SISTEMA GESTIONE ASSC</b>	<b>PC 49 ALL 01</b>
	<b>SANIFICAZIONE E STERILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI – CDOM</b>	Data 29/02/2024

## **PROCEDIMENTO PER LA SANIFICAZIONE E STERILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI**

### TRATTAMENTO DEI TERMOMETRI CLINICI: (pratica consigliata a fine di ogni turno)

- 1) Lavare i termometri ed i loro contenitori con acqua e detergente.
- 2) Risciacquarli, asciugarli e immergerli in una soluzione acquosa di disinfettante per 30 minuti.
- 3) Asciugarli e conservarli asciutti nei loro contenitori.
- 4) Nell'attività diretta dopo l'uso con un utente/ospite pulire il termometro con disinfettante e cotone/garza puliti.

### TRATTAMENTO DI SFIGMOMANOMETRO/FONENDOSCOPIO

- 1) Lavare, le sole parti a contatto con cliente, acqua e detergente.
- 2) Disinfettare le parti interessate con disinfettante lasciando agire per 30 minuti mantenendo una garza imbibita a contatto con lo strumento.
- 3) Asciugarli e conservarli asciutti nei loro contenitori.

### STERILIZZAZIONE PRESIDI MEDICO/CHIRURGICI:

Per i Servizi Domiciliari viene utilizzato tutto materiale sterile monouso (arcelle, kit cateterismo, kit medicazione, kit sutura, kit rimozione sutura, pinze levapunti metallici...)

